

Kortfattet bruksanvisning av Cadd Solis VIP i PCA (Pasientkontrollert analgesi) modus

Cadd solis VIP som utleveres av REB for smerte- og medikamentbehandling til hjemmeboende er på forhånd satt i PCA modus. I PCA modus er det behov for nøkkel. Kode som benyttes er 201.

Bruksanvisningen erstatter ikke gjeldende prosedyrer, den er kun en teknisk veiledning. Ved behov for mer spesifisert bruksanvisning vises til «PCA – leveringsmodus, pasientveiledning»

Oppstart av pumpen

- Monter kassetten, bruk hendelen og lås pumpen med nøkkelen
- Slå på pumpen
- **Program** → før inn innstillingene, bruk piltastene → Tilbake
- **Oppgaver** → *OBS at pasienten er frakoblet!!* Fyll sett → Stopp fyll
- Koble til pasienten
- Start → Gjennomgå innstillingene og aksepter verdiene → Neste → start pumpen

Sjekk av pumpens innstillinger

- Kan utføres mens pumpen går
- **Program** → naviger med piltastene, sjekk mot forordning og før i skjema

Sjette/nullstille bolus eller totalt infundert volum

- Kan utføres mens pumpen går.
- **Oppgaver** → Vis rapporter → Totalt gitt dose og PCA bolus → Slett evt. gitt volum eller bolus

Endre innstillinger

- Stopp infusjonen
- **Program** → endre innstillingene og lagre
- Start → Gå gjennom innstillingene og aksepter verdiene → Neste → start pumpen

Skifte kassett uten endringer i innstillinger

- Stopp infusjonen
- Lås opp pumpen med nøkkelen
- Ta av gammel og monter ny kassett
- Lås pumpen med nøkkelen
- Valg om å stille reservoarvolum tilbake og fylle slangen
- Start pumpen